

icare
HOME



Handleiding voor patiënt

Eigendom van:

Icare HOME (model: TA022)
HANDLEIDING VOOR PATIËNT
TA022-035 NL-3.1

Inleiding

In deze handleiding leest u hoe u de Icare HOME-tonometer moet gebruiken.

Lees alle instructies in deze handleiding zorgvuldig voordat u de tonometer gebruikt.

Inhoudsopgave

Overzicht van tonometer	4
De tonometer voorbereiden voor gebruik ..	6
De juiste stand voor de tonometer	8
De meting uitvoeren.....	10
Problemen oplossen	12
De batterijen vervangen	14
De tonometer reinigen	16

Ondersteuning

Als u vragen hebt over het gebruik van de Icare-tonometer of als zaken onduidelijk zijn, kunt u een bezoek brengen aan de website van Icare op:


www.icaretonometer.com

Overzicht van tonometer

Voor




Achter

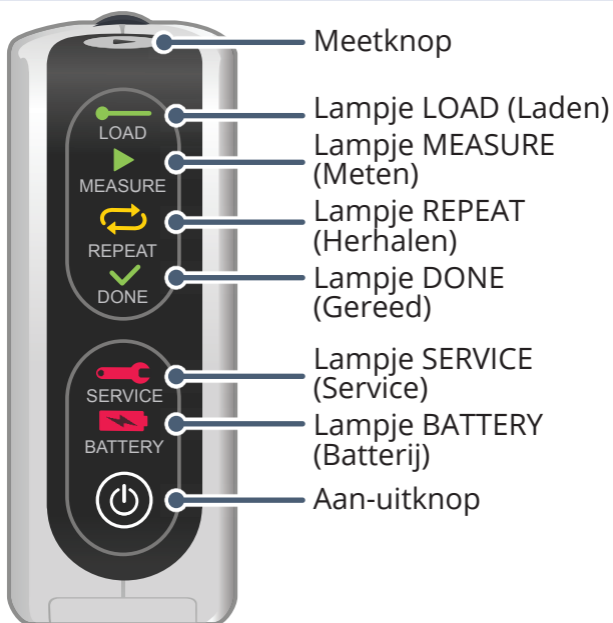

- Instelwielkje voor voorhoofdsteun
- Voorhoofdsteun
- Sensoren voor oogherkenning (herkennen welk oog wordt gemeten)
- Sondebasis (met indicatielampje)
- Sonde
- Jukbeensteun

Onder

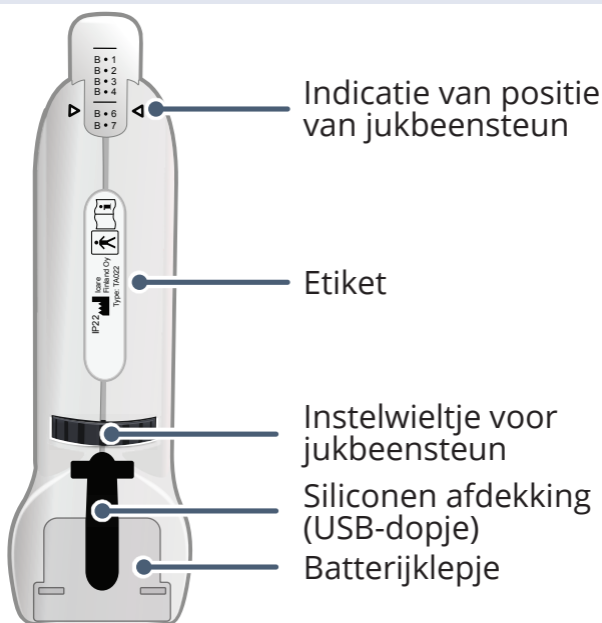

De tonometer voorbereiden voor

- 1** Zorg ervoor dat de posities van de voorhoofd- en jukbeensteun overeenkomen met de posities die de oogkundige voor u op het label voor de steunposities heeft geschreven.

U vindt het label voor de steunposities in het koffertje. Draai zo nodig aan de steunwielletjes om de juiste positie in te stellen voor de steunpunten.

- 2** Druk de  Aan-uitknop kort in om de tonometer in te schakelen. Alle indicatielampjes op het achterpaneel knipperen een keer en er klinkt een korte pieptoon.


Het lampje LOAD (Laden) blijft knipperen om aan te geven dat de tonometer gereed is voor het laden van de sonde.

- 3** Pak een nieuwe sonde en maak de verpakking open.



VOORZICHTIG:

- Gebruik uitsluitend originele en gecertificeerde sondes die zijn gemaakt door de producent.
- Raak de sonde niet aan.





- 4** Haal het dopje van de sondehouder, laat de sonde in de sondebasis vallen, druk vervolgens kort (1 seconde) op de knop  Measure (Meten).

Het lampje MEASURE (Meten) begint te knipperen als de tonometer gereed is voor metingen.




VOORZICHTIG:

- Raak de sonde niet aan.
- Laat de tonometer niet omlaag wijzen.
- Gebruik een sonde niet meer als deze in aanraking is gekomen met een niet-steriel oppervlak zoals een tafel of vloer.

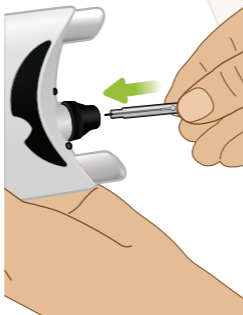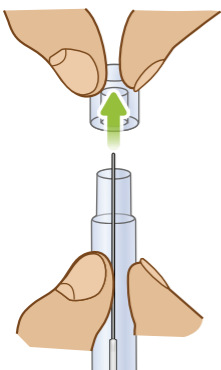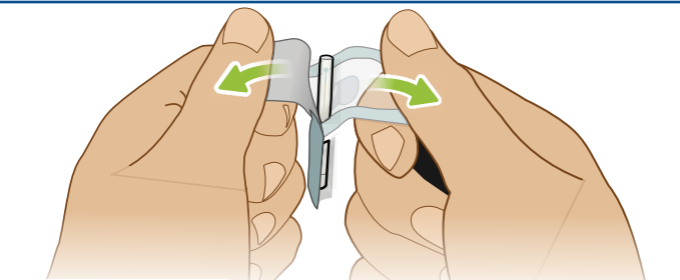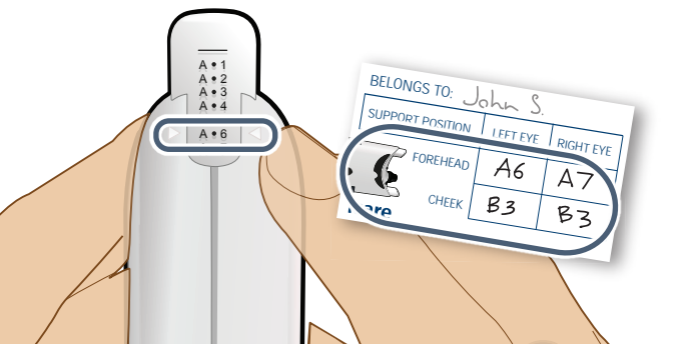



De juiste stand voor de tonometer

- 5** Ga voor een spiegel staan en houd de tonometer zijwaarts voor uw gezicht.

 **WAARSCHUWING:** Zorg dat de tonometer geen contact maakt met uw ogen.

- 6** Lijn de punt van de sonde uit op het midden van het hoornvlies en verdraai de tonometer totdat de punt van de sonde recht naar het hoornvlies wijst.

 **WAARSCHUWING:** Zorg dat de tonometer geen contact maakt met uw ogen.







 **VOORZICHTIG:** Dek de sensoren voor oogherkenning niet af.

- 7** Kijk of het lampje op de sondebasis groen is.

Als het lampje op de sondebasis rood is, kijkt u mogelijk niet recht vooruit. Houd uw hoofd in een hoek van 90° en draai of kantel de tonometer totdat het lampje op de sondebasis groen wordt.

- 8** Zorg ervoor dat de sonde in een rechte lijn op het midden van uw oog staat zodat de sonde bij een meting contact maakt met het midden van het hoornvlies.

Herhaal stap 5 en 6 als de sonde niet goed is gecentreerd op uw oog.

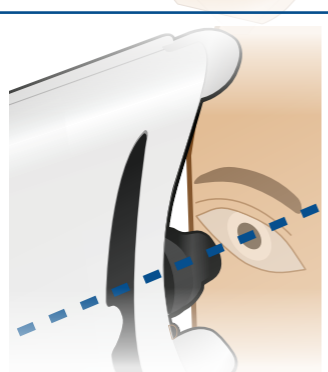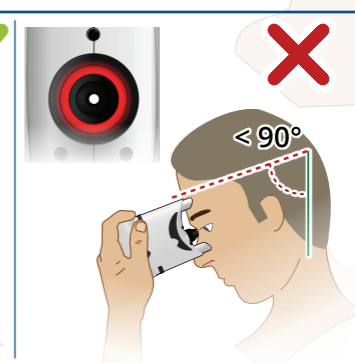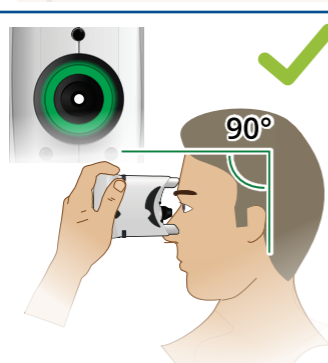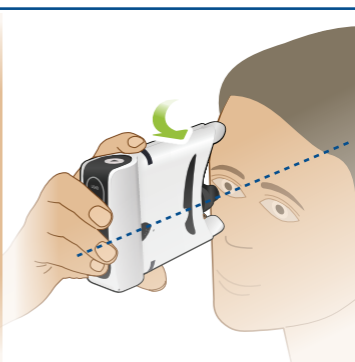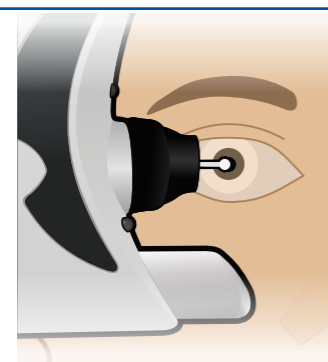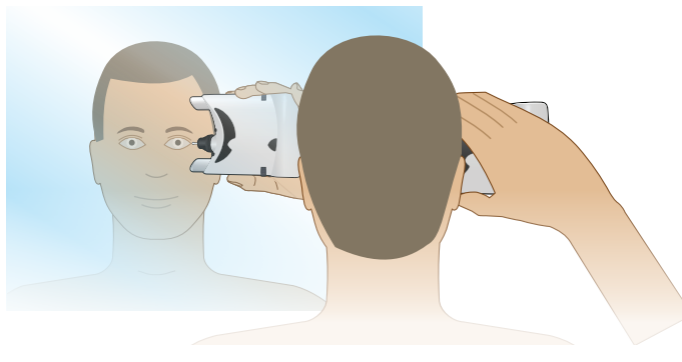

De meting uitvoeren


9 Druk op de knop  **Measure (Meten)** om de oogdruk te meten (sonde maakt contact met het oog tijdens metingen).

Houd de knop ingedrukt om een reeks van 6 metingen achter elkaar te maken, of

Druk 6 keer kort (1 seconde) op de knop om zes afzonderlijke metingen te maken.


10 Als de metingen goed zijn uitgevoerd, hoort u een lange pieptoon, gaat het lampje op de sondebasis uit en gaat het lampje **Done (Gereed)** branden.




Stop de gebruikte sonde weer in het buisje en voer de sonde af.

 **VOORZICHTIG:** Als er een fout optreedt, drukt u kort (1 seconde) op de knop **Measure (Meten)** en gaat u verder met meten.

11 Als u van de dokter beide ogen moet meten, herhaalt u stap 1 tot en met 10 voor uw andere oog.

12 Nadat alle metingen zijn voltooid, drukt u op de  **Aan-uitknop** en houdt u deze ingedrukt totdat u 3 korte pieptonen hoort.

 **OPMERKING:** De tonometer wordt automatisch uitgeschakeld als deze 3 minuten niet wordt gebruikt.

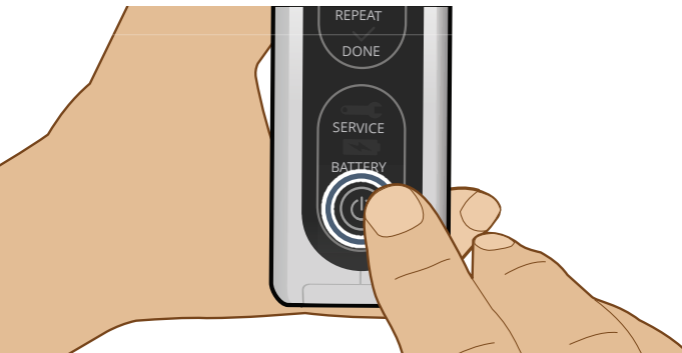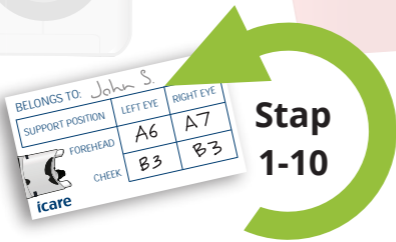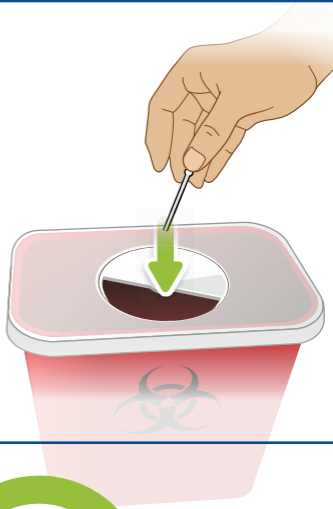

Problemen oplossen

Foutmelding



Lampje op sondebasis brandt rood.

Oorzaak: tonometer wordt niet recht gehouden.



Lampje op sondebasis knippert rood, het lampje Measure (Meten) gaat uit en er klinken 2 pieptonen.

Oorzaak: tonometer is te ver van of te dicht bij het oog of wordt niet recht gehouden.



Lampje op sondebasis knippert rood, het lampje Repeat (Herhalen) knippert en er klinken 2 pieptonen

Oorzaak: te veel variatie tussen metingen of oogherkenning is mislukt.



Lampje op sondebasis knippert rood, het lampje Service knippert en er klinken 2 pieptonen

Oorzaak: sondebasis is vies of beschadigd, of sonde is vies. Tonometer reinigen of onderhouden.





Lampje Battery (Batterij) knippert

Oorzaak: batterij is bijna leeg

Oplossing

1. Zorg dat u recht vooruit kijkt. Houd uw hoofd hiervoor in een hoek van 90°.
2. Pas de schuine stand van de tonometer aan totdat het lampje op de sondebasis groen wordt.

1. Druk op de knop  Measure (Meten) om de fout te wissen.
2. Pas de positie van de tonometer aan.
3. Herhaal de meting.

1. Druk op de knop  Measure (Meten) om de fout te wissen.
2. Controleer of de sensoren voor oogherkenning of de slaapzijde van het oog niet worden afgedekt.
3. Herhaal de meting.





Neem contact op met de leverancier van de tonometer voor onderhoud van de tonometer.

Vervang de batterij.

Zie pagina 14-15 voor aanwijzingen

De batterijen vervangen

- 1** Maak de siliconen afdekking los en schuif het batterijklepje open.
- 2** Verwijder de gebruikte batterijen en plaats 2 nieuwe CR123A lithiumbatterijen.
Zorg dat de positieve pool (+) van de batterij naar het batterijklepje wijst.
- 3** Schuif het batterijklepje weer op de tonometer en plaats de siliconen afdekking op de USB-poort.

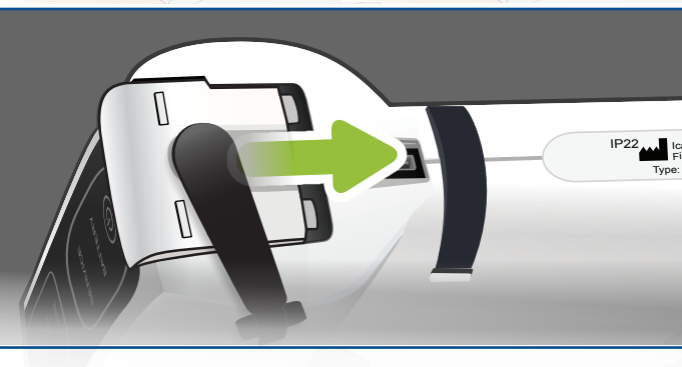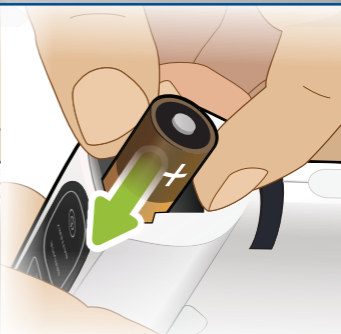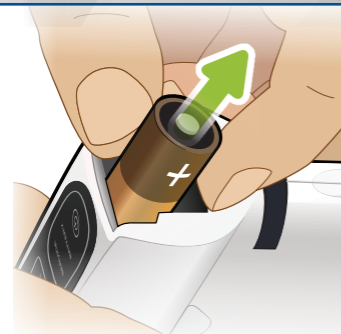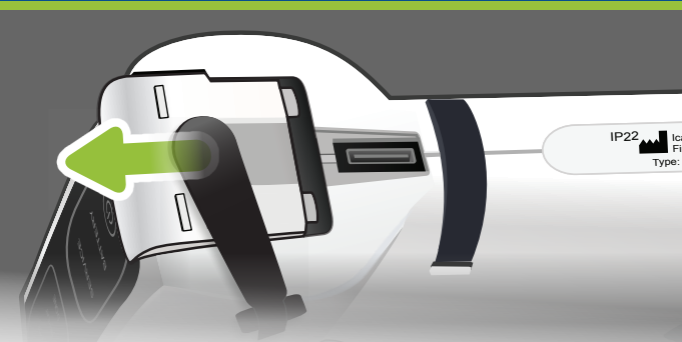

De tonometer reinigen

- 1 Maak een doek of papieren handdoekje licht vochtig met water.**

Knijp het overtollige vocht uit de doek of het papieren handdoekje.



- 2 Reinig de tonometer met de vochtige doek of het vochtige papieren handdoekje.**



VOORZICHTIG: Dompel de tonometer niet in water of een andere vloeistof.



OPMERKING: Alle onderhoudswerkzaamheden, behalve vervanging van de batterijen en reiniging van het instrument, moeten worden uitgevoerd door de fabrikant of een gecertificeerd servicecenter.

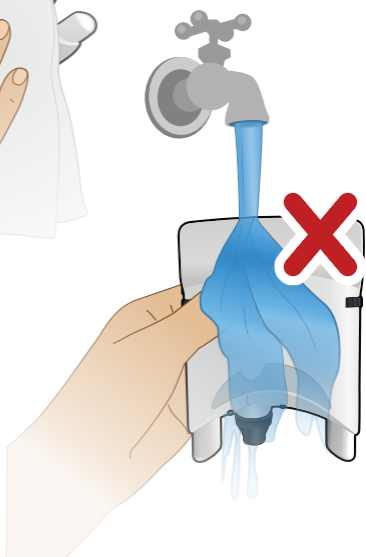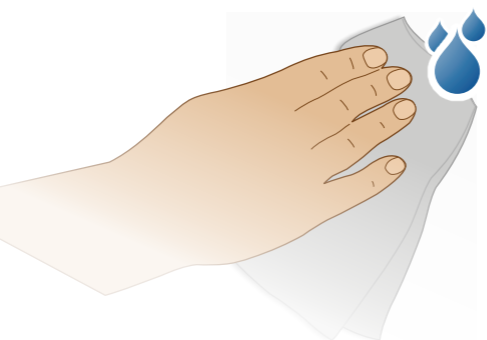

icare

measuring
excellence

www.icaretonometer.com